


39330/39333 I/39335/39336 Hanske 39340 Erme Veiledning til måltaking

elements
body

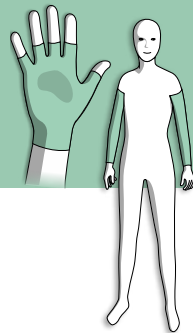

Orange & firkant = lengde

Blå & ring = omkrets


Veiledning til måltaking. Alle mål er i cm. Lengdemål (orange) - målebåndet må ligge mot huden, men ikke dra i det. Alle mål tas uten å stramme, og rett mot huden. Alle mål skal tas når pasienten er liggende, avslappet og har normal pusterytme. Det er nyttig å sette små merker på pasienten for å sikre riktig måltaking. Kort erme er til under albuen.

Hanske

- L/R30 Tommel: Omkrets MCP ledd
- L/R31 Tommel: Omkrets distalt ledd, eller hvor hanskens finger skal slutte på kort finger
- L/R32 Pekefinger: Omkrets proksimalt ledd, eller der hvor hanskens finger skal slutte på kort finger
- L/R33 Pekefinger: Omkrets distalt ledd, eller der hvor hanskens finger skal slutte på lang finger
- L/R34 Langfinger: Omkrets proksimalt ledd, eller der hvor hanskens finger skal slutte på kort finger
- L/R35 Langfinger: Omkrets distalt ledd, eller der hvor hanskens finger skal slutte på lang finger
- L/R36 Ringfinger: Omkrets proksimalt ledd, eller der hvor hanskens finger skal slutte på kort finger
- L/R37 Ringfinger: Omkrets distalt ledd, eller der hvor hanskens finger skal slutte på lang finger
- L/R38 Lillefinger: Omkrets proksimalt ledd, eller der hvor hanskens finger skal slutte på kort finger
- L/R39 Lillefinger: Omkrets distalt ledd, eller der hvor hanskens finger skal slutte på lang finger
- L/R40 Omkrets håndflaten ved tommelroten, flat hånd
- L/R41 Omkrets ved knokene for hanske uten fingre, der hvor den skal slutte
- L/R42 Tommel: Lengde MCP til der hvor hanskens finger skal slutte
- L/R43 Pekefinger: Fra roten av fingeren til proksimalt ledd, eller der hvor den skal slutte på kort finger.
- L/R44 Pekefinger: Fra pekefinger roten til der hvor den skal slutte på lang finger
- L/R45 Langfinger: Fra roten av fingeren til proksimalt ledd, eller der hvor den skal slutte på kort finger.
- L/R46 Langfinger: Fra langfinger roten til der hvor den skal slutte på lang finger.
- L/R47 Ringfinger: Fra roten av fingeren til proksimalt ledd, eller der hvor den skal slutte på kort finger.
- L/R48 Ringfinger: Fra Ringfinger roten til der hvor den skal slutte på lang finger.

39330/39333 I/39335/39336 Hanske 39340 Erme Veiledning til måltaking

elements
body

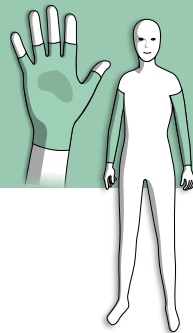

- L/R49 Lillefinger: Fra roten av fingeren til proksimalt ledd, eller der hvor den skal slutte på kort finger.
- L/R50 Lillefinger: Fra Lillefinger roten til der hvor den skal slutte på lang finger.
- L/R51 Hanske med fingre: Fra tommelroten til roten av pekefingeren
Hanske uten fingre: Fra tommelroten til enden av hansken
- L/R52 Hanske med fingre - Fra håndledd til mellomrommet mellom peke- og langfinger
Hanske uten fingre - Fra håndledd til der hansken slutter
- L/R53 Hanske med fingre - Fra håndledd til mellomrommet mellom ring- og lillefinger
Hanske uten fingre - Fra håndledd til der hanske slutter (på ulnarsiden)
- L/R55 Håndledd

Hanske kort og lang, ERME

- L/R54 Langt erme - Håndledd til albue
Kort erme - Håndledd til enden av plagget
- L/R55 Langt erme - Håndledd
Kort erme - Håndledd
- L/R56A Langt erme - Underarmens tykkeste punkt
L/R56B Kort erme - Midt mellom håndledd og enden av plagget
- L/R57 Langt erme - Albue
Kort erme - Enden av plagget
- L/R58 Langt erme - Albue til enden av plagget
- L/R59 Langt erme - Midt mellom albue og enden av plagget