

BRUKSANVISNING

SBi TREKK

SBI COVER

SBi trekket beskytter og holder produktet rent.

Trekket er designet for bruk sammen med produktene SBi Motus, Motus Smart, SBi Frame og SBi Wheel.

Materialet er semielastisk med glidelås på baksiden.

Gummisålen gir økt stabilitet ved gange.

Trekket kan vaskes.



SBi trekket er værbestandig og laget for å beskytte mot vanskelige værforhold, men det er ikke beregnet for bruk i vann/bad. Vær ekstra oppmerksom på glatte gulvflater og våte underlag. Ikke kjør bil med SBi Walker på, med eller uten trekk.

INSTRUKSJON

TRINN 1

Åpne glidelåsen.

TRINN 2

Ta på walkeren først og deretter trekket.

TRINN 3

Når trekket er på plass, dra opp glidelåsen hele veien opp.



Trinn 1



Trinn 2



Trinn 3

MATERIALE

100% Lycra

RENGJØRING

Vask trekket for hånd med vrangsiden ut. Lufttørkes.

GARANTI

Trekket har garanti for produksjonsfeil. Ta kontakt med utprøveren umiddelbart om du oppdager problemer med produktet.

OBS!

SBi Trekket kan ikke brukes ved bading, dusjing eller svømming. En korrekt applisering er vesentlig for å oppnå riktig funksjon. Følg retningslinjene og instruksjonene du har fått av utprøveren.



Optima Molliter S.r.l.
Via Breda, 19/21 • 62012 Civitanova Marche (MC)
T +39 0733 801060 • F +39 0733 801048
info@optimamolliter.com
www.optimamolliter.com