

# 51602 - Jura Håndflatebeskytter

## Produktbeskrivelse

Designet for å tillate full bevegelse i fingrene samtidig som den reduserer kontrakturer og hudskader i håndflaten.

## Bruksanvisning (se bilder)

1. Åpne borrelåsbåndet og monter håndflatebeskytteren med pasientens tommel gjennom hullet som vist på bildet. (Fig. 1)  
Jura-etiketten skal synes på utsiden.
2. Fest borrelåsbåndet over håndbaken og fest mot det harde borrelåsbåndet. Klipp båndets lengde ved behov. (Fig. 2)
3. For å strekke ut fingrene ytterligere og hjelpe til med å løsne et hardt grep, sett inn en rull av skumgummi eller annet materiale i åpningen mellom håndflaten og polstringen.
4. Obs! Pass på at det harde borrelåsbåndet ikke er i kontakt med huden. Kontroller at det er rett ortose for riktig side (venstre/høyre).

## Størrelser og side

Størrelse: Omkrets håndledd

Venstre: Universal

Høyre: Universal

## Indikasjoner

Håndflatebeskytteren kan lindre krokete fingre, håndkontrakturer og kramper. Håndflatebeskytteren gir en dyne som demper for at fingrene skal rulle seg, noe som forhindrer fingre og negler fra å grave seg inn i håndflaten samtidig som den gir fingrene støtte.

## Kontraindikasjoner

- Ikke bruk over åpne sår.
- All kjent allergi og/eller overfølsomhet mot noe materiale angis i produktsammensettingen.
- Utfør regelmessig hud- og sirkulasjonskontroller.
- Forsiktighet bør iakttas om den foreskrives til pasienter med diabetes, vaskulære problemer og neuropati.

## Advarsler og forsiktighetsregler

Vi anbefaler at den første utprøvingen gjøres av egnet, kvalifisert helsepersonell som vil gi råd om brukstid.

- Les nøye gjennom alle instruksjoner og advarsler før bruk.
- Følg alle instruksjoner for å sikre korrekt funksjon.
- Ikke bruk liniment, salve, gel, krem eller noen andre stoffer på området som er berørt.
- Ikke bruk om igjen til en annen pasient. Om du gjør det risikerer du kryssinfeksjon og kan kompromittere integriteten til produktet.
- Utfør regelmessig hud- og sirkulasjonskontroller; spesielt for pasienter med diabetes, vaskulære sykdommer og neurologiske skader.
- Om det oppstår noen bivirkninger skal man slutte å bruke produktet og kontakte pleiepersonale eller leverandøren av dette produktet.
- Produktets holdbarhet kan påvirkes av enkelte faktorer; f.eks. kan gjenstander med skarpe kanter skade borrelåsbåndene. For å hindre dette bør borrelåsene alltid festes i materialet når produktet ikke er i bruk eller når det vaskes.

## Vask og vedlikehold

1. Lukk borrelåsbåndet.
2. Håndvaskes i kaldt vann med mild såpe.
3. Skyll og deretter lufttørkes.
4. Kan ikke sentrifugeres eller tørkes i trommel.
5. Ikke bruk skyllemiddel.
6. Kontroller om produkte er skadet som kan påvirke bruken.
7. Kontroller med jevne mellomrom at borrelåsbåndet fungerer som det skal.

## Materiale

Polyester, nylon.

## Oppbevaring og transportforhold

Oppbevares i originalforpakning på en sval og tørr plass uten direkte sollys.

## Gjenbruk og avhending

Forpakninger og bestanddeler bør gjenvinnes eller kastes i henhold til lokale eller nasjonale lover

## Alvorlig hendelse

Rapporter alle alvorlige hendelser til produsenten og kompetent myndighet i EU-medlemsstaten eller i det landet der du bor.

