

S.O.T TOMMELORTOSE

Hvileortose som posisjonerer tommelen i et optimalt hvileleie.



EN NY UNIK
ORTOSELØSNING!



S.O.T TOMMELORTOSE

er en helt ny anatomisk formet ortose for tommel og håndflate.

Ortosen er utformet for å begrense bevegelsene i tommelens CMC- og MCP-ledd, gi støtte for håndens hvelv samt posisjonere tommelens ledd og muskler i et behagelig hvileleie.

Indikasjoner:

Ved artrose* revmatoid artritt, adduksjonskonstraktur i tommelen og ved overbelastningsskader.

BEGRENS BEVEGELSEN



ADDUSERT TOMMEL



- Ortosen har en justerbar aluminiumkjerne som enkelt kan tilpasses/formes om til en individuell passform.
- Ortosen kan justeres etterhvert som kontrakturen forandres.
- Ortosen kan vaskes i maskin med trekket montert i 40°C.
- Det smidige designet gjør den til et utmerket alternativ til spesialproduserte hvileortoser.

* OA - CMC-regionen grad I-4¹. Ved OA i etappe 4 er os scaphoideum også involvert. Da bør tommelstøtten kombineres med en håndleddsortose.
¹Eaton and Littler Classification of Basilar Thumb Arthritis.

EKSTRA STØTTE

Når man også trenger støtte for håndleddet kan S.O.T Tommelortose brukes sammen med en håndledds-ortose, f.eks. art.nr. 46029 Vission Håndleddsortose eller art.nr. 35207 Selection Open wrist. For pasienter med underarmsfraktur som i løpet av immobiliseringstiden har utviklet adduksjonskontraktur, kan S.O.T Tommelortose med fordel brukes nattetid kombinert med en håndleddsstøtte. For pasienter med carpaltunnelssyndrom er det i tillegg til håndleddsstøtten fordelaktig å få støtte under MCP-leddene og så åpne opp hånden for å gi bedre plass for medianus-nerven i carpaltunnelen nattetid. Dette er også gunstig ved artritt/artrose hvor det foreligger risiko for intrinsic-forkorting. Båndsettet på S.O.T Tommelortose tas da av og produktet plasseres inne i håndleddsortosen som vist på bildene.




Her vises S.O.T Tommelortose i kombinasjon med håndleddsortosen VISSION. En smidig og funksjonell ortoseløsning når støtte også trengs for håndleddet.





S.O.T TOMMELORTOSE

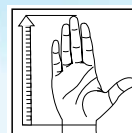

Art.nr.	Betegnelse	Side	Størrelse	MCP Brede**	Lengde* * (fra håndledd til fingertupp)
28720 1011	S.O.T Tommelortose*	Venstre	Small	≤7,5 cm	≤ 18,5 cm
28720 1012	S.O.T Tommelortose*	Venstre	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm
28720 1013	S.O.T Tommelortose*	Venstre	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm
28720 2011	S.O.T Tommelortose*	Høyre	Small	≤7,5 cm	≤ 18,5 cm
28720 2012	S.O.T Tommelortose*	Høyre	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm
28720 2013	S.O.T Tommelortose*	Høyre	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm
28721 1011	Ekstra trekk	Venstre	Small		
28721 1012	Ekstra trekk	Venstre	Medium		
28721 1013	Ekstra trekk	Venstre	Large		
28721 2011	Ekstra trekk	Høyre	Small		
28721 2012	Ekstra trekk	Høyre	Medium		
28721 2013	Ekstra trekk	Høyre	Large		

* Komplet ortose med et trekk.

** Forholdet mellom hånd og fingrenes lengde kan variere.

Se derfor størrelsesintervallene kun som en guide.

Les mer om S.O.T Tommelortose på hjemmesiden. Der finnes både instruksjonen og Tips & Tricks som kan lastes ned både for terapeuten og for brukeren. [www.camp.no/hand-og-handledsortoser/tommelortoser/SOT Tommelortose](http://www.camp.no/hand-og-handledsortoser/tommelortoser/SOT_Tommelortose).