

CAMP[®]

Produktkatalog **TRAUMA**

www.camp.no



Support for Better Life!

Hei.

Vi er glade for å kunne presentere et utvalg av produkter velegnet for traumebehandling. Produktene egner seg godt for deg som arbeider på operasjonsavdeling, akutt- eller ortopedmottak.

Camp Scandinavia tilbyr et bredt sortiment av produkter for å kunne møte de behov dere som fagpersoner har. Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 13485. Dette innebærer at vi har tydelige målsettinger for produksjon og miljø. Majoriteten av vårt sortiment er designet av våre egne produktutviklere, og produsert på våre egne produksjonsanlegg. Det innebærer at vi har kontroll over produktet hele veien, og at beslutningsveiene ved f.eks. forbedringer er korte.

I vårt forbedringsarbeide er vi takknemlig for tilbakemeldinger vi får fra dere kunder. Hver produktserie har sin egen historie, men alle har samme fellesnevner: "Support for Better Life" er ikke bare vårt motto. Det er noe som preger alle våre produkter, hvordan vi opptrer som selskap og vår rolle som produktspesialist.

Vi håper denne katalogen gir en oversikt over produkter som er velegnet for ulike sorter behandling av traume. Besøk gjerne vår hjemmeside; **www.camp.no** for å se hele vårt produktsortiment. Har du spørsmål eller ønsker nærmere informasjon – ta kontakt med vår kundeservice eller en av våre produktspesialister.

Vi ses!

Kundeservice, tlf. 23 23 31 20, info@camp.no



Frøydís Alstad Stenhaug
Produktspesialist/ Offentlig godkjent
ortopediingeniør
Mobil: 905 04 084
froydis.stenhaug@camp.no



Marthe Glæserud
Salgskordinator
Tlf: 23 23 31 26
marthe.glaeserud@camp.no



Unni Sandkvist
Produktspesialist /
Administrativ leder
Tlf: 23 23 31 23
unni.sandkvist@camp.no



Petter Blegen
Produktspesialist / Fysioterapeut
Tlf: 99 42 45 46
petter.blegen@camp.no

INNHOOLD

Produktkategori	Sider
Plast og materiale	4 - 14
Hånd- og håndleddsortoser	15 - 16
Arm- og skulderortoser	17 - 21
Fot- og ankelortoser	21 - 23
Kneortoser	24
Nakkeortoser	25 - 27
Ryggortoser	28
Post-OP	29

X-LITE® & 3D-LITE™

X-LITE® er et luftig og lett materiale som er laget for å møte dine krav ved framstilling av gipsskinner, sirkulærgips og ortoser. Materialet er laget av 100% bomullsvev som er impregnert med et ikke toksisk termoplast-resin. Alle reaktive substanser i termoplasten er herdet ved produksjonen, noe som innebærer at det ikke avgis farlig damp ved gipsing eller når gipsen fjernes med sag eller saks.

X-LITE® er et giftfritt materiale som kan håndteres uten hansker og spesialventilasjon i gipsrommet. Det er ufarlig for personalet som arbeider med X-LITE®, inklusive gravide, astmatikere og personer som lider av allergi.

3D-LITE™ er et materiale med samme egenskaper som X-LITE®, men basen er en tredimensjonal polyester. 3D-LITE™ er et overlegent materiale for produksjon av skinner og ortoser. 3D-LITE™ materialet finnes også som LSO- og TLSO-korsett i ferdige moduler for produksjon av individuelt tilpassede korsetter.

X-LITE® egenskaper og fordeler

UTMERKET VENTILASJON

Den åpne strukturen i materialet gir bra ventilasjon og komfort. Huden kan puste og det skapes et bedre miljø for bl.a. heling av sår.

LETTVEKT

X-LITE® produktene er ultralette for pasientens komfort og akseptering av gipsen.

KAN GJENBRUKES OG FORMES OM

Spar penger og tid! Gjenbruk det som blir til overs på rullen eller blir til overs i form av restbiter. Gjør små justeringer på en ferdig gips eller skinne i stedet for å lage en helt ny gips som koster mer penger, mer tid og ubehag for pasienten.

VARIER STABILITETEN

Legg til flere lag av gips for økt stabilitet. Legg til remser av gips når kun spesifikke områder må forsterkes.

UTMERKET FORMBARHET

Former seg utmerket etter kroppens anatomi - må ikke strekkes eller dras.

SELVKLEBENDE

Selvklebende ved oppvarming. Velcro og polstring hefter lett og permanent på X-LITE®.

TØRKER RASKT

Etter kun 30 minutter er gipsen stabil og vekt bærende.

SLIPPER IGJENNOM RØNTGENSTRÅLER


Alle X-LITE® materialene slipper igjennom røntgenstråler opp til tre lag gips.

STABILT

X-LITE® er et ekstremt stabilt materiale. Det kreves færre lag av materiale for likeverdig stabilitet sammenlignet med andre gipsmaterialer på markedet.

X-LITE® Produktsortiment


X-LITE® finnes i tre ulike varianter; Classic, Premium og Plus. Hvilket materiale som passer best velges avhengig av indikasjon og personlig preferanse.

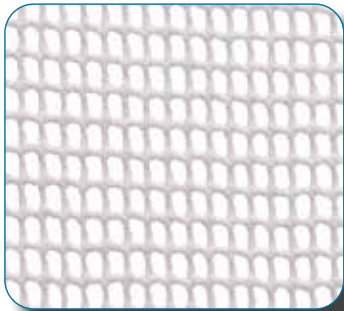

CLASSIC

er originalmaterialet. De større åpningene i nettet gir en god ventilasjon. Fordi det er det sterkeste X-LITE® materialet, kan det brukes til alle typer gips og skinner

- Originalen
- Har størst hull i strukturen
- Mest ventilerende
- Mest styrke ved høy belastning
- Hvit, kongebå og antrasittgrå

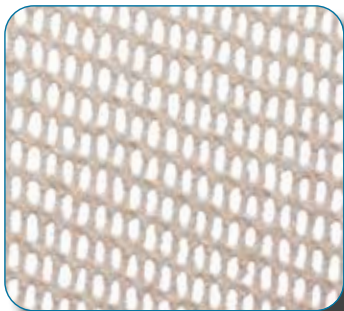

PREMIUM

er laget i samme materiale som CLASSIC, men i en tynnere kvalitet med mindre åpninger. Det gjør PREMIUM mer elastisk, og den passer derfor til mindre applikasjoner på øvre ekstremiteter og til barn.

- Tynnere og finere struktur
- Til mindre ortoser, øvre ekstremiteter og barn
- Høy stretch og formbarhet
- Myke kanter
- Beige og hvit



PLUS

er det nyeste X-LITE® produktet. Materialet finnes i fem farger og det har en myk overflate av polyester.

- Myk tekstil overside
- Myke kanter
- Styrke lik Classic
- Fem ulike farger; hvit, svart, blå, rød og knallrosa
- Passende kantebånd i dispenser

Instruksjoner

- X-LITE® skal varmes i vannbad i ca. 68-70°C. Kan også varmes i en skål med varmt vann.
- X-LITE® ark varmes i vann i ca. 1 minutt og ruller i ca. 3 minutter. Vær nøye med at rullene blir helt gjennomtrukket med vann. Forsikre deg om at materialet er godt oppvarmet før du begynner å arbeide med det.
- Bruk tang for å ta opp materialet fra vannbadet for å unngå direkte kontakt med vannet. La overflødig vann renne av materialet før applisering. Materialet i seg selv blir ikke varmt.
- Bekytt sår og arr med riktig forbindelse. Ved frakturingsgipsing, bruk stockinette og foampolstring for å beskytte huden under gipsmaterialet.
- Punktvarm områder for permanent fiksering av tilbehør som f.eks. bånd og borrelås.
- Materialet kan formes om så mange ganger som nødvendig for samme pasient. Gjenbruk restbiter og ruller.
- Mindre justeringer kan gjøres gjennom punktvarming på en ferdig gips med en hårtørker. Hold alltid din egen hånd nær området som varmes opp for å unngå å brenne pasienten.
- Bruk kjølepose eller kjølespray for raskere å kjøle ned ortosen.



X-LITE® Classic rull

X-LITE® Classic er det mest stabile materialet. Den åpne strukturen gjør materialet luftig og lar huden puste. X-LITE® Classic er en giftfri miljøgips som alle våre andre X-LITE® materialer, helt uten isocyanater og glassfiber. X-LITE® Classic rullene har en beskyttelsesfilm mellom lagene som fjernes under sirkuleringen.

Velg mellom tre farger: hvit, antrasitt og kongeblå.

Bruksområder: Sirkulær gips.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
64103	Hvit	50 mm	1,8 m	20 ruller
64133	Hvit	75 mm	1,8 m	20 ruller
64136	Antrasitt	75 mm	1,8 m	5 ruller
64137	Kongeblå	75 mm	1,8 m	5 ruller
64143	Hvit	100 mm	1,8 m	10 ruller
64146	Antrasitt	100 mm	1,8 m	5 ruller
64147	Kongeblå	100 mm	1,8 m	5 ruller
64153	Hvit	125 mm	1,8 m	10 ruller
64163	Hvit	150 mm	1,8 m	10 ruller



X-LITE® Classic ark og dispenser

X-LITE® Classic er det mest stabile materialet. Den åpne strukturen gjør materialet luftig og lar huden puste. Classic er en giftfri miljøgips som alle våre andre X-LITE® materialer, helt uten isocyanater og glassfiber. X-LITE® Classic kan bestilles som ark eller i en praktisk dispenserboks med 10 meter som man klipper til ønsket lengde. Materialet finnes i tre ulike farger hvit, antrasitt og kongeblå.

Bruksområder: Gipsskinner, ortoser og avtagbare skinner.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Antall pr. pk.	Ark/Dispenser
64250	Hvit	75 mm	10 m	1	Dispenser
64251	Hvit	100 mm	10 m	1	Dispenser
64252	Hvit	150 mm	10 m	1	Dispenser
64253	Hvit	200 mm	10 m	1	Dispenser
64254	Hvit	125 mm	10 m	1	Dispenser
64255	Antrasitt	150 mm	10 m	1	Dispenser
64256	Kongeblå	150 mm	10 m	1	Dispenser
64290	Hvit	200 mm	375 mm	15	Ark
64292	Hvit	200 mm	900 mm	15	Ark
64293	Hvit	75 mm	375 mm	15	Ark
64294	Hvit	100 mm	375 mm	15	Ark
64295	Hvit	125 mm	375 mm	15	Ark
64296	Hvit	150 mm	375 mm	15	Ark
64297	Hvit	150 mm	900 mm	15	Ark
64299	Hvit	500 mm	500 mm	10	Ark
64302	Antrasitt	200 mm	375 mm	8	Ark
64304	Kongeblå	200 mm	375 mm	8	Ark
64307	Hvit	300 mm	900 mm	10	Ark



X-LITE® PLUS rull

X-LITE® PLUS ruller har en myk overside som gir en myk og behagelig gips for pasienten. X-LITE® PLUS er en giftfri miljøgips som alle våre andre X-LITE materialer, helt uten isocyanater og glassfiber. X-LITE® PLUS rullene har ingen beskyttelsesfilm mellom lagene, så materialet appliseres raskt og enkelt på pasienten.

Velg mellom fem farger: hvit, rød, blå, svart og knallrosa.

Bruksområder: Sirkulær gips.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk./Rull
64701	Hvit	25 mm	1,8 m	5
64702	Hvit	50 mm	1,8 m	20
64703	Hvit	75 mm	1,8 m	20
64704	Hvit	100 mm	1,8 m	10
64706	Hvit	125 mm	1,8 m	10
64707	Hvit	150 mm	1,8 m	10
64711	Rød	25 mm	1,8 m	5
64712	Rød	50 mm	1,8 m	20
64713	Rød	75 mm	1,8 m	20
64714	Rød	100 mm	1,8 m	10
64716	Rød	125 mm	1,8 m	10
64717	Rød	150 mm	1,8 m	10
64721	Blå	25 mm	1,8 m	5
64722	Blå	50 mm	1,8 m	20
64723	Blå	75 mm	1,8 m	20
64724	Blå	100 mm	1,8 m	10
64726	Blå	125 mm	1,8 m	10
64727	Blå	150 mm	1,8 m	10
64731	Svart	25 mm	1,8 m	5
64732	Svart	50 mm	1,8 m	20
64733	Svart	75 mm	1,8 m	20
64734	Svart	100 mm	1,8 m	10
64736	Svart	125 mm	1,8 m	10
64737	Svart	150 mm	1,8 m	10
64741	Knallrosa	25 mm	1,8 m	5
64742	Knallrosa	50 mm	1,8 m	20
64743	Knallrosa	75 mm	1,8 m	20
64744	Knallrosa	100 mm	1,8 m	10
64746	Knallrosa	125 mm	1,8 m	10
64747	Knallrosa	150 mm	1,8 m	10



X-LITE® PLUS ark og dispenser

X-LITE® PLUS har en myk overside som gir økt pasientkomfort. X-LITE® PLUS er en giftfri miljøgips som alle våre andre X-LITE® materialer, helt uten isocyanater og glassfiber. X-LITE® PLUS kan bestilles som ark eller i en praktisk dispenserboks med 10 meter som man klipper til ønsket lengde.

Velg mellom fem farger: hvit, rød, blå, svart og knallrosa.

Bruksområder: Alle skinner og ortoser.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Antall pr. pk.
64790	Rød	150 mm	10 m	1 Dispenser
64791	Blå	150 mm	10 m	1 Dispenser
64792	Svart	150 mm	10 m	1 Dispenser
64793	Knallrosa	150 mm	10 m	1 Dispenser
64753	Blå	200 mm	375 mm	8 ark
64754	Svart	200 mm	375 mm	8 ark



X-LITE® Premium rull

X-LITE® Premium er det mest fleksible materialet. Med sin tynne struktur er det ikke like stabilt som øvrige X-LITE® materialer. Derimot er det enklere å forme perfekt over mindre konturer, og passer godt til bandasje for øvre ekstremiteter og barn. X-LITE® Premium er en giftfri miljøgips som alle våre andre X-LITE® materialer, helt uten isocyanater og glassfiber. X-LITE® Premium ruller har en beskyttelsesfilm mellom lagene som fjernes under sirkuleringen.

Bruksområder: Sirkulærgips. For økt stabilitet kan man applisere et ekstra lag.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
64205	Hvit	50 mm	1,8 m	5 ruller
64207	Hvit	75 mm	1,8 m	5 ruller
64209	Hvit	100 mm	1,8 m	5 ruller
64210	Hvit	125 mm	1,8 m	5 ruller
64211	Hvit	150 mm	1,8 m	5 ruller



X-LITE® Premium ark og dispenser

X-LITE® Premium er det mest fleksible materialet. Med sin tynne struktur er det ikke like stabilt som øvrige X-LITE® materialer. Derimot er det enklere å forme perfekt over mindre konturer, og passer godt til bandasje for øvre ekstremiteter og barn. X-LITE® Premium er en giftfri miljøgips som alle våre andre X-LITE® materialer, helt uten isocyanater og glassfiber. Materialet kan bestilles som ark eller i en praktisk dispenserboks med 10 meter som man klipper til ønsket lengde.

Bruksområder: Gipsskinner, ortoser og avtagbare skinner. For økt stabilitet kan man applisere et ekstra lag.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Antall pr. pk.	Ark/Dispenser
64217	Beige	100 mm	375 mm	10	Ark
64219	Beige	150 mm	375 mm	10	Ark
64226	Beige	100 mm	10 m	1	Dispenser
64227	Beige	150 mm	10 m	1	Dispenser
64228	Beige	200 mm	10 m	1	Dispenser



Stockinette dispenser

Stockinette dispenser er en rundstrikket polyester stockinette som er myk og føyelig. Stockinetten er ribbstrikket, noe som gir en bra passform og ingen skrukker som kan gnage mot huden. Rullene kommer i en praktisk dispenser.

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
64394	Hvit	30 mm	25 m	1 dispenser
64395	Hvit	50 mm	25 m	1 dispenser
64396	Hvit	70 mm	25 m	1 dispenser
64397	Hvit	100 mm	25 m	1 dispenser
64398	Hvit	150 mm	25 m	1 dispenser



X-LITE® Stockinette

Rundstrikket stockinette i 100% ubleket polypropylen. Myk og behagelig med en utmerket evne til å transportere fukt bort fra huden. Stockinetten er ribbestrikket, noe som gir en god passform og ingen brett mot huden.

Art. nr.	Farge	Materiale	Bredde	Lengde	Pk.
64400	Beige	Bomull	21 mm	23 m	1 rull
64401	Hvit	Polypropen	30 mm	10 m	1 rull
64411	Hvit	Polypropen	50 mm	10 m	1 rull
64421	Hvit	Polypropen	70 mm	10 m	1 rull
64431	Hvit	Polypropen	100 mm	10 m	1 rull
64441	Hvit	Polypropen	150 mm	10 m	1 rull
64442	Hvit	Polypropen	200 mm	10 m	1 rull




Foam-bind

Foam-bindet er en skumgummipolstring som puster og ikke trekker til seg så mye vann. Polstringen gir bra støtdemping og er ikke like følsom for bretter som tradisjonell gipspolstring.

Bruksområder: Som polstring under gips av X-LITE.®

Art. nr.	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
64480	Hvit	75 mm	2,75 m	20 ruller
64485	Hvit	100 mm	2,75 m	16 ruller
64490	Hvit	125 mm	2,75 m	10 ruller



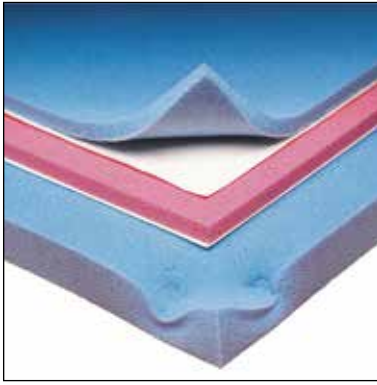

T-Stick

Trykkavlastende materiale i polyuretan som puster. Materialet former seg etter kroppen og har minne slik at det går tilbake til opprinnelig form. Brukes til avlastning av trykkpunkter og som polstring i ortoser og proteser. Selvklebende bakside. Arkene 51100 og 51102 har selvklebende bakside. Finnes i to hardhetsgrader.

Art. nr.	Farge	Kategori	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.
51100	Blå	Medium	410 mm	610 mm	9,5 mm	2 ark
51101	Blå	Medium	410 mm	610 mm	25 mm	1 ark
51102	Rosa	Myk	410 mm	610 mm	9,5 mm	2 ark



Manosplint® Skumpolstring

Skumpolstring med lett trykkavlastende effekt. Brukes som polstring for ortoser. Polstringen har lukkede celler og er enkel å rengjøre. Materialet er selvklebende og tøybart, noe som gjør det enkelt å påføre. Kan festes direkte til ortosen eller brukes til å avlaste trykket på beinsporer under gips. Den selvklebende baksiden må ikke legges direkte på huden, så under gips festes materialet til strømpen. Tilgjengelig i beige og svart.

Art.nr.	Farge	Bredde	Lengde	Tykkelse	Pk.
51128	Svart	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark
51129	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark



Color elastisk bind

Som en perfekt avslutning på din X-LITE® gipsskinne tilbyr vi elastisk bind i høy kvalitet og i fine farger. Da komforten og kvaliteten på bindet er veldig høy, er den perfekt for pasienter som skal bære gipsen i lang tid. Color elastisk bind puster, og sammen med X-LITE® gipsen gir det en veldig luftig bandasje.

Den har en myk overflate og vevde kanter som føles behagelig mot huden. Den tilpassede elastisiteten gjør at den former seg fint og at den derfor kan brukes både til større og mindre applikasjoner. Den har en "anti-slip" effekt, noe som betyr at lagene ikke deler seg og man får et holdbart resultat. Elastisk bind kan vaskes i 60°C og steriliseres.

Art. nr.	Modell	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
64106	Color elastisk bind	Svart	6 cm	5 m	10
64107	Color elastisk bind	Rød	6 cm	5 m	10
64108	Color elastisk bind	Royal Blue	6 cm	5 m	10
64109	Color elastisk bind	Grønn	6 cm	5 m	10
64110	Color elastisk bind	Gul	6 cm	5 m	10
64112	Color elastisk bind	Svart	10 cm	5 m	10
64113	Color elastisk bind	Royal Blue	10 cm	5 m	10



X-LITE® plate med silikonbelegg

Brukes som arbeidsoverflate ved gipsing med X-LITE®. Silikonbelegget forhindrer at X-LITE® fester seg til underlaget. Den perforerte overflaten på platen gjør at overflødig vann fra X-LITE® rullene lett kan renne ned under platen og suges opp av underliggende håndduk.

Art. nr.	Bredde	Lengde
64811	325 mm	530 mm
64812	400 mm	600 mm



VWR Vannbad

Tank av rustfritt stål dekt med en ytre stålplate. Leveres med et praktisk transparent plastlokk og en universalplate i bunnen for å beskytte karet. Universalplaten kan enkelt tas ut og rengjøres. Vannbadet har digitale temperaturinstillinger og en tappekran for praktisk tømning.

- Rask oppvarming (ca. 30 minutter med kaldt vann fra springen)
- Digital temperaturindikator med tre forinnstilte temperaturer
- Temperaturområde +5 til 99°C med en presisjon på ±0,2°C
- Alarm for lavt vannivå, og vannbadet slår seg av automatisk

Art. nr.	Størrelse	Bredde	Lengde	Høyde
64515	26 L	Yttermål:33,5 cm Kar:27,8 cm	Yttermål:59 cm Kar:48,1 cm	Yttermål: 43 cm Kar:17,5 cm



Ergo Super Gipssaks

En førsteklasses saks laget av ekstremt holdbart japansk rustfritt stål. Saksen har forsterkede blad av Wolframkarbid. Det nedre bladet har fine tagger og et skarpt vinklet øvre blad. Modellen har en innovativ ergonomisk toppring "vinklet utenfor senter" for å avlaste trykket på tommelen for personer som bruker saksen daglig. To fingre i den nedre fingerringen avlaster også trykket og forbedrer komforten. Saksen kan autoklaveres.

Art. nr.	Materiale	Lengde
51219	Rustfritt stål med forsterkede blad av Wolframkarbid	18 cm



Bandasjesaks med plasthåndtak

Praktisk saks med stort grep, beregnet for ulike plastmaterialer. Saksen er laget i rustfritt stål AISI 420 og kan autoklaveres. Et prisgunstig alternativ.

Art. nr.	Farge	Materiale	Lengde
51211	Svart	AISI 420	18 cm
51212	Grønn	AISI 420	18 cm
51213	Gul	AISI 420	18 cm



Supersaks

En veldig skarp saks med stort håndtak. Passer utmerket til å klippe i plastmateriale, selv når platen har begynt å bli hard. Laget av rustfritt stål AISI 420. Kan autoklaveres.

Art. nr.	Materiale	Lengde
51217	AISI 420	20 cm



Bøyd MAYO Saks

Bøyd saks med små håndtak. Velegnet til trimming av kanter på ortoser hvor platen har begynt å bli hard. Laget av rustfritt stål AISI 420. Kan autoklaveres. Kan brukes med høyre eller venstre hånd.

Art. nr.	Materiale	Lengde
51214	AISI 420	14 cm



Smith Saks

En veldig skarp saks med stort håndtak. Er lett å håndtere og bruke på myke plastmaterialer. Laget av rustfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveres.

Art. nr.	Materiale	Lengde
51216	AISI 420	18 cm



Gipssaks rustfri

En saks i høy kvalitet som klipper lett i alle materialer. Nedre blad med fin sagtann og skarpt vinklet øvre blad. Saksen er laget i rustfritt stål og kan autoklaveres.

Art. nr.	Modell	Lengde
51208	Gipssaks rustfri	14 cm
51207	Gipssaks rustfri	18 cm
51218	Gipssaks rustfri venstrehandt	18 cm



Gipssaks vinklet Nibbler

Liten presisjonssaks av høy kvalitet som kan brukes til å klippe i kalde og varme plastmaterialer. Ideell til små justeringer rundt omkring på ortosen og for å trimme kanter på en ferdig ortose eller sirkulærgips. Den nedre eggen er tannet. Laget av rustfritt stål som kan autoklaveres.

Art. nr.	Modell	Lengde
51209	Gipssaks vinklet nibbler	12 cm

HÅND- OG HÅNDEDDSORTOSER



SELECTION® Fingerloop

Et tvillingbånd som effektivt holder sammen to eller flere fingre, så den sterkere fingeren kan hjelpe den svakere som støtte, beskytte og/eller for å øke bevegelsesomfanget. Kan også brukes som en statisk progressiv ortose for økt bevegelsesomfang i DIP-leddet.

Ortosen er laget i 100% slitesterk og hurtigtørkende nylon. Båndet er sveiset uten sømmer, og derfor enkel å skjære til for en individuell passform. Flere biter kan eventuelt brukes samtidig.

Det halvpreparerte Fingerloop-arket som er 10 cm bredt kan enkelt klippes med en saks til enkle bånd i ønsket bredde.

Bruksområder: Støtte for fingrene etter for eksempel skade, operasjon, stabile frakturer, metacarpalfrakturer, kroniske smertetilstander, forstuvninger, leddslitasje og kontrakturer.

Art.nr.	Modell	Størrelse	Bredde	Lengde	Antall pr. pk.
35219	SELECTION® Fingerloop	Universal	2 cm	15.5 cm	5
35220	SELECTION® Fingerloop Ark	-	10 cm	15,5 cm	1



Mål: Omkrets håndledd.

Vission fingerskinne

Fingerskinne for immobilisering av fingre etter skade eller operasjon som har til hensikt å forebygge kontrakturer i fingerleddene. Kan også brukes ved konservativ fingerterapi samt ved Dupuytren syndrom og tilstander som krever tilfeldig immobilisering av fingrene.

Bruksområder: Immobilisering av fingre etter skade eller operasjon, konservativ fingerterapi, Dupuytren syndrom og tilstander som krever tilfeldig immobilisering av fingrene.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46020	Vission Fingerskinne	Small	< 16 cm	Bilateral
46020	Vission Fingerskinne	Medium	16 - 19 cm	Bilateral
46020	Vission Fingerskinne	Large	> 19 cm	Bilateral



Mål: Omkrets håndledd.

Wrist Lacer™ II, kort

Veldig stabil håndleddsorthese med formbare aluminiumskinner dorsalt og volart. Skinnene kan tas ut og formes. En pute på innsiden av ortosens strømppe beskytter tommelbasens sener ved den distale snøringen. Laget av slitesterk mokkaimitasjon med før som puster. Låsingsssystem med unikt design som gir en jevn kompresjon gjennom alle fire båndene. Kompresjonen kan enkelt justeres av pasienter med uvanlig form på underarm og håndledd. Snøringen er lett å åpne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgrep.

Bruksområder: Karpaltunnelsyndrom, posttraumatisk og postoperativt.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 21 cm i størrelse M. For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube –kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Svart	Pediatric	<12 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Svart	X-Small	12-14 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Svart	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Svart	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Svart	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Svart	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Svart	XX-Large	22-25 cm	Ve/Hø



Mål: Omkrets håndledd.

Wrist Lacer™ II, lang

Veldig stabil håndleddsorthese i lang modell med formbare aluminiumskinner dorsalt og volart. Skinnene kan tas ut og formes. En pute på innsiden av ortosens strømppe beskytter tommelbasens sener ved den distale snøringen. Laget av slitesterk mokkaimitasjon med før som puster. Låsesystem med unikt design som gir en jevn kompresjon ved hjelp av alle de fire båndene. Kompresjonen kan enkelt justeres av pasienter med uvanlig form på underarm og håndledd. Snøringen er lett å åpne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgrep.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt, revmatologiske sykdommer og spastisitet.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 26 cm i størrelse M. For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavia sin YouTube-kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk etter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™ II Lang	Svart	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™ II Lang	Svart	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™ II Lang	Svart	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™ II Lang	Svart	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø

ARM- OG SKULDERORTOSER



Albueortose Ulnaris

En ortose som effektivt begrenser albuens fleksjon for å lindre smerte i forbindelse med cubitaltunnelsyndrom.

Ortosen er myk, polstret og med en justerbar aluminiumskinne som lett kan tilpasses. Produktet er produsert av et ultralett materiale som puster. En lomme på innsiden, som armen føres inn i, gjør det lett å ta på ortosen.

Bruksområder: Cubitaltunnelsyndrom eller enhver annen lidelse i albuen hvor begrensning/støtte av albuen ønskes.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Ve/Hø
42219	Svart	En størrelse	Bilateral



Skulderlås

En universal armslynge med lav profil som er enkel å applisere. Den leveres komplett med et midjebånd rundt kroppen der overarmen er festet for effektivt å immobilisere skulderen. Håndleddsfestet fester til midjebåndet foran og dette festes i sin tur igjen ved skulderstroppen med hjelp av en hurtigspenne. Den har dessuten et ekstra tommelbånd for å holde hånden i rett vinkel for å unngå dropphånd. Skulderstroppen er justerbar for å få en komfortabel passform for pasienten og for å passe til både venstre og høyre side. Det finnes en stor komfortpute som fordeler trykket over skulderen/kragebenet. Dette er en skulderlås som er lett å montere, og som er komfortabel og enkel i bruk. Midjebåndets lengde er 120 cm.

Bruksområder: Avlastning posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Model	Farge	Størrelse
42213	Skulderlås	Svart	En størrelse



Armslynge med abduksjonspute

En universell armslynge, som effektivt immobiliserer skulderen. Den komfortable skulderlåsen leveres med en 15° abduksjonspute som enkelt festes på innsiden av selen. Puten er avtagbar.

Den indre delen av abduksjonsputen er formet for å hvile mot pasientens kropp.

Bruksområder: Kan brukes for ulike problemer i skulderen. Rotatorcuffkirurgi, glenohumerale dislokasjoner/subluksasjon, posterior/fremre kapselreparasjoner, mykdelskirurgi, overbelastning.

Art.nr.	Farge	Størrelse
42218	Blå	En størrelse



Armslynge på rull

Denne enkle varianten av armslyngen (Collar'n Cuff), mitella, leveres på rull à 12 meter. I forpakningen følger det med to ruller, hvor den ene ligger i en dispenser og 10 stk.Y-borrelåsfester for å skape en fiksering av armen. Materialet er mykt og smidig samtidig som det holder formen selv under belastning.

Bruksområde: Anbefales ved traume på håndledd, albue og skulder. Kan også brukes i kombinasjon med gips.

Art. nr.	Modell	Farge	Bredde	Lengde	Pk.
42212	Armslynge på rull	Svart	5 cm	2 x 12 meter	Rull




Armslynge BOMULL

Enkel armslynge av bomull med trinnløst skulderbånd. Skulderbåndet har en polstring som kan flyttes for økt komfort. Doble D-ringer gjør det mulig med bruk både med og uten underarmsgips eller ortose. Tommelløkke.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av skulder og arm. Posttraumatiske og postoperative tilstander.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
47101	Grå	Small	25-28 cm	Bilateral
47101	Grå	Medium	27-30 cm	Bilateral
47101	Grå	Large	29-32 cm	Bilateral
47101	Grå	X-Large	31-34 cm	Bilateral

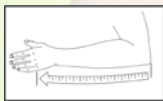

Mål: Albue til MCP.



Armslynge FOAM

Armslynge med ekstra bånd for fiksering. Vattert materiale. Justerbart skulderbånd som fester hvor som helst på ortosen.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av skulder og arm. Posttraumatiske og postoperative tilstander.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
20031	Grå	Small	28-36 cm	Bilateral
20031	Grå	Medium	35-42 cm	Bilateral
20031	Grå	Large	41-49 cm	Bilateral
20031	Grå	X-Large	48-56 cm	Bilateral



Mål: Albue til MCP.



Mål: Albue til håndledd

Armslynge NETTING

Luftig armslynge med trinnløst justerbart skulderbånd. Skulderbåndet har en polstring som kan flyttes for økt komfort. Doble D-ringer gjør det mulig for bruk både med og uten underarmsgips eller ortose. Tommelløkke.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av skulder og arm. Posttraumatiske og postoperative tilstander.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål	Ve/Hø
47100	Grå	Small/Medium	27-30 cm	Bilateral
47100	Grå	Large/X-Large	31-34 cm	Bilateral

Vission skulderortose IMMO

Vission Skulderortose er beregnet for immobilisering og holde overarm, albue og underarm i en 90° eller 130° vinkel. Ortosen er spesielt egnet for skulder- og brystkasseskader. Produktet er vendbart og kan brukes på både venstre og høyre skulder.

Bruksområder: Skulder-, arm-, albue- og skader i skulderområdet (fraktur, dislokasjon og forstuing). Etter skulder- og brystkassekirurgi. Plexus brachialis parese.

Kontraindikasjoner: Ingen kjente.



Mål: Mål 1: Omkrets brystkasse

Mål 2: Lengde overarm

Art. nr.	Modell	Størrelse	Mål 1	Mål 2
46022	VISSION Skulderortose IMMO	X-Small	68 - 78 cm	< 30 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Small	80 - 90 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Medium	90 - 100 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Large	100 - 113 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	X-Large	113 - 120 cm	> 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	XX-Large	120 - 140 cm	> 38 cm

Armslynge WRAP

Tradisjonell armslynge i to deler som kan justeres uavhengig av hverandre. Skulderbåndet har en polstring som kan flyttes for økt komfort. Armdelen har en plastspenne på ryggen som holder sammen de to båndene for å hindre at disse gli ut over skuldrene. Omslaget justeres trinnløst med borrelåsbånd.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av skulder og arm. Posttraumatiske og postoperative tilstander.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
47102	Grå	Small/Medium	23 cm, 32 cm	10 cm, 132 cm	Bilateral
47102	Grå	Large/X-Large	25 cm, 35 cm	13 cm, 155 cm	Bilateral



Mål 1: Slynge Høyde og Bredde

Mål 2: Omslag Høyde og Lengde



Mål: Omkrets overarm proksimalt.

Humerus Humerusortose

Denne humerusortosen er basert på de velkjente prinsippene for en Sarmiento ortose, en jevn sirkulær kompresjon. De tre sirkulære båndene strammes uavhengig av hverandre. Forankringen av ortosen over skulderområdet gjør at den sitter godt uten å gli ned. Stroppen som går under motsatt arm har avtagbar polstring for økt komfort. Dette gir en behagelig ortose som er enkel å ta og som pasienten lett kan godta. Det ventilerende materialet i ortosen lar huden puste og reduserer risikoen for irritasjon. Ortosen har to plater av termoplast som kan justeres ved oppvarming om nødvendig, og formen kan justeres med saks. I de fleste tilfeller er ikke dette nødvendig. Ortosen gir fri bevegelse av albueleddet. Tekstilmaterialene er testet i samsvar med Øko-tex standard 100 og inneholder ikke lateks.

Bruksområder: Humerusfrakturer (Skafffrakturer).

Art. nr.	Farge	Størrelse	Lengde	Omkrets
62105	Svart	Small	28 cm	18 - 26 cm
62105	Svart	Medium	30 cm	26 - 34 cm
62105	Svart	Large	32 cm	34 - 42 cm
62105	Svart	X-Large	34 cm	42 - 50 cm

FOT- OG ANKELORTOSER



Walker Fixed Høy

Immobiliserende walker i høy modell, laget av formsprøytet polypropen. Den er i et lett, holdbart og stabilt design. Ortosen har to faste sidestøtter i metall som gir god stabilitet for fot og ankel. Den vatterte polstringen er foret med mykt velourstoff som slipper igjennom luft og som kan vaskes. Polstringen beskytter mot støt og gir optimal komfort. Latexfri. Leveres med to ekstra kondyleputer for å lindre trykket og gi ekstra komfort. Rullesåle med anti-slip gjør det mulig med en komplett gangsyklus. Justerbare borrelåsbånd garanterer komplett immobilisering. Enkel å tilpasse. Tilpasset for kilesystem.

Bruksområder: Alle grader av forstuet ankel. Mykdelsskader i leggen, foten og/eller ankelen. Distale stressfrakturer i tibia og fibula.

Art. nr.	Model	Størrelse	Lengde	Skostørrelse
47605	Walker Fixed, høy	Small	35 cm	34-38
47605	Walker Fixed, høy	Medium	42 cm	39-42
47605	Walker Fixed, høy	Large	42 cm	43-45
47613	Ekstra polstring	Small	-	-
47613	Ekstra polstring	Medium	-	-
47613	Ekstra polstring	Large	-	-



Walker Protect Fixed, høy

Immobiliserende walker i høy modell, laget av formsprøytet polypropen, i et holdbart design som er stabil og har lav vekt. Walkeren har to faste sidestøtter som gir utmerket stabilitet for fot og ankel, to rigide buer (en foran og en bak) samt en vattering over vristen for å styrke immobiliseringen. Walkeren sin indre vatterte tekstil er foret med et mykt, luftig og vaskbart velourstoff som beskytter mot støt og sikrer optimal komfort. Lateksfri. Leveres med to ekstra kondyleputer for å avlaste ved trykk og for å gi ekstra komfort. Rullesåle med antislip tillater en komplett gåsyklus. Justerbare bånd med borrelås garanterer komplett immobilisering. Tilpasset for kilesystem. Slipper igjennom røntgenstråler. Lett å prøve ut.

Bruksområder: Stabile fot- og ankelfrakturer, akutt ankeldistorsjon, halseneruptur, mykdelsskader og postoperativ immobilisering.

Annet: Høyde 42 cm.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Lengde innersåle
47608	Protect fixed høy	Small	25 cm
47608	Protect fixed høy	Medium	29 cm
47608	Protect fixed høy	Large	32 cm
47611	Ekstra båndsett	En størrelse	
47615	Ekstra polstring	Small	
47615	Ekstra polstring	Medium	
47615	Ekstra polstring	Large	
47617	Kiler, sett	Small	
47617	Kiler, sett	Medium	
47617	Kiler, sett	Large	
47618	Tåbeskytter	En størrelse	



Walker Protect Fixed, lav

Immobiliserende walker i lav modell, laget av formsprøytet polypropen, i et holdbart design som er stabil og har lav vekt. Walkeren har to faste sidestøtter som gir utmerket stabilitet for fot og ankel, to rigide buer (en foran og en bak) samt en vattering over vristen for å styrke immobiliseringen. Walkeren sin indre vatterte tekstil er foret med et mykt, luftig og vaskbart velourstoff som beskytter mot støt og sikrer optimal komfort. Lateksfri. Leveres med to ekstra kondyleputer for å avlaste ved trykk og for å gi ekstra komfort. Rullesåle med antislip tillater en komplett gåsyklus. Justerbare bånd med borrelås garanterer komplett immobilisering. Tilpasset for kilesystem. Slipper igjennom røntgenstråler. Lett å prøve ut.

Bruksområder: Stabile fot- og ankelfrakturer, akutt ankeldistorsjon, halseneruptur, mykdelsskader og postoperativ immobilisering.

Annet: Høyde 27 cm.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Lengde innersåle
47609	Protect Fixed lav	Small	25 cm
47609	Protect Fixed lav	Medium	29 cm
47609	Protect Fixed lav	Large	32 cm
47612	Ekstra båndsett	En størrelse	
47616	Ekstra polstring	Small	
47616	Ekstra polstring	Medium	
47616	Ekstra polstring	Large	
47617	Kiler, sett	Small	
47617	Kiler, sett	Medium	
47617	Kiler, sett	Large	
47618	Tåbeskytter	En størrelse	



Walker ROM høy

Immobiliserende walker, laget av formsprøytet polypropen, med lav vekt, holdbar og stabilt design. Ortoosen har to faste metallstøtter som stabiliserer foten og ankelen, samt et integrert luftsystem hvor man gradvis kan øke/minske immobilisering etter behov. ROM kontroll som tillater progressiv mobilisering mellom 45° plantarflexjon og 30° dorsalfleksjon med et intervall på 7,5°. Kan låses i 0°, 10° og 20° plantarflexjon.

Den vatterte polstringen er foret med et mykt, luftig og vaskbart stoff som beskytter mot støt og sikrer optimal komfort. Latexfri. Rullesåle med anti-slip tillater en komplett gangsyklus. Justbare borrelåsbånd garanterer komplett immobilisering. Ekstra polstring, båndsett og tåbeskytter kan bestilles. Lett å tilpasse.

Bruksområder: Akutt forstuvet ankel, mykdelsskader, distale stressfrakturer på skinnleggen, stabile frakturer på fot og ankel, etter akilleseneoperasjoner, ved immobilisering av ankel- og tåledd, rehabilitering av ankelledd, Post-ORIF ankelkirurgi.

Annet: Høyde Small 35 cm. Høyde Medium og Large 42 cm.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
47606	Walker ROM høy	Small	Bilateral	34-38
47606	Walker ROM høy	Medium	Bilateral	39-42
47606	Walker ROM høy	Large	Bilateral	43-45
47610	Ekstra båndsett	Small	-	-
47610	Ekstra båndsett	Medium/Large	-	-
47613	Ekstra polstring	Small		
47613	Ekstra polstring	Medium		
47613	Ekstra polstring	Large		



Walker AIR høy

Immobiliserende walker, laget av formsprøytet polypropen, i et holdbart design som både har lav vekt og er stabil. Walkeren har et integrert luftsystem hvor man gradvis kan øke/reducere immobilisering etter behov. Ortoosen har to faste metallstøtter som stabiliserer foten og ankelen. Den vatterte polstringen er foret med et mykt, luftig og vaskbart stoff som beskytter mot støt og sikrer optimal komfort. Latexfri. Rullesåle med antigli tillater en komplett gåsyklus. Justerbare bånd med borrelås garanterer komplett immobilisering. Ekstra polstring, båndsett og tåbeskytter kan bestilles. Tilpasset for kilesystem. Lett å tilpasse.

Bruksområder: Stabile fot- og ankelfrakturer, akutt ankeldistorsjon, hæleneruptur, mykdelsskader og postoperativ immobilisering.

Annet: Høyde Small 35 cm. Høyde Medium, Large 42 cm.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Lengde innersåle
47607	Walker Air høy	Small	23 cm
47607	Walker Air høy	Medium	27 cm
47607	Walker Air høy	Large	30 cm
47610	Ekstra båndsett	Small	
47610	Ekstra båndsett	Medium/Large	
47614	Ekstra polstring	Small	
47614	Ekstra polstring	Medium	
47614	Ekstra polstring	Large	
47617	Kiler, sett	Small	
47617	Kiler, sett	Medium	
47617	Kiler, sett	Large	
47618	Tåbeskytter	En størrelse	

KNEORTOSER



Ascender® post-op kneortose

Ascender® er en teleskopisk (44-70cm) postoperativ kneortose med innstilling mellom -10° (hyperekstensjon) og 70° . Fleksjonsbegrensning kan stilles inn mellom -10° og 120° . Innstillingen justeres enkelt ved å løfte og flytte stopperne i leddet. Leddet kan også låses i fem ulike posisjoner: -10° (hyperekstensjon), 0° (nøytral), 10° , 20° , 30° fleksjon. Leddet kan sikres ekstra ved å sette inn en "Anti-tamper" låsing ovenfor selve stopperen. Denne må klippes bort med saks om man senere ønsker å åpne innstillingen.

Hver skinne kan justeres til ønsket lengde individuelt. På hver skinne finnes en hekte som åpnes. Skinnen har tydelige markeringer for å forenkle at det blir samme lengde på den laterale og den mediale skinne.

Den myke og føyelige polstringen har antigli materiale på innsiden. Båndene låses med ekstra låseklips for å holdes på plass under utprøvingen. Ortosen lukkes med kraftige spenner som hektes fast. Båndenes lengde kan enkelt justeres ved å løsne Y-festet og klippe båndet til ønsket lengde. Polstringen og båndene kan vaskes for hånd i lunkent vann med mild såpe. Universalmodell som passer både venstre og høyre. En størrelse.

Bruksområder: Postoperativ behandling.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Lengde	Ve/Hø
47540	Ascender post-op kneortose	En størrelse	44 – 70 cm	Bilateral
47541	Komplett polstring- og båndsett	En størrelse		Bilateral
47542	Ekstra polstringssett	En størrelse		Bilateral
47543	Ekstra båndsett	En størrelse		Bilateral



ROM Postoperativkneortose

Postoperativ kneortose i universalstørrelse. Polstringen kan klippes til ønsket størrelse uten å frynse seg. Skinner av aluminium som kan formes for best mulig passform. Den komfortable og luftige polstringen holdes på plass av de sirkulære båndene. Det innkapslede polysentriske leddet er enkelt å justere. Leddet har pinner som holdes fast i leddet med små plastbånd for å hindre at pinnene faller ut. Leddet låses fast med en skrue for å hindre at det endres. Leddet kan stilles i ønsket grad av fleksjon (10° , 15° , 30° , 50° , 70° , 90° , 110°) og ekstensjon (5° , 10° , 15° , 30° , 50° , 70° , 90° , 110°). Modellen finnes i en kort og en lang versjon.

Bruksområde: Postoperativ eller posttraumatisk behandling for immobilisering av kneleddet for kontroll av fleksjon/ekstensjon.

Art.nr.	Modell	Farge	Størrelse	Lengde
28308	Kneortose, kort	Mørkeblå	En størrelse	40 cm
28309	Kneortose, lang	Mørkeblå	En størrelse	60 cm
28311	Ekstra Båndsett 28308 kort	Mørkeblå	En størrelse	-
28312	Ekstra Båndsett 28308 lang	Mørkeblå	En størrelse	-
28313	Ekstra Polstring 28308 kort	Mørkeblå	En størrelse	-
28314	Ekstra Polstring 28309 lang	Mørkeblå	En størrelse	-

NAKKEORTOSER



Pacific halskrage

Todelt halskrage av polyethylene som fikseres med borrelås på begge sider. Det stabile skallet følger hakens fasong og hviler bekvemt mot brystbenet. Kragen er lavere på sidene for ikke å gnage mot skuldre eller ører. Høyden på kragen justeres ved hjelp av to plastsruer. En myk og luftig polstring uten sømmer er inkludert. Polstringen kan vaskes eller byttes ut.

Bruksområder: Instabilitet, smerte og postoperativt.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Høyde
20625	Hvit/Svart	Small/Medium	5,5-9,5 cm
20625	Hvit/svart	Medium/Large	8-13 cm
20626	Ekstra polstring, svart	Small/Medium	
20626	Ekstra polstring, svart	Medium/Large	



Trachea halskrage

Todelt halskrage i plastazote med tracheostomiåpning. Halskragen er anatomisk formet for god passform og plastforsterket i nakken og under haken. Fikseres med borrelås på begge sider.

Bruksområder: Instabilitet, smerte og postoperativt.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Høyde	Omkrets
20619	Beige	Small	5,5 cm	25- 3 cm
20619	Beige	Medium	5,5 cm	33-41 cm
20619	Beige	Large	5,5 cm	41-48 cm
20620	Beige	Small	8 cm	25-33 cm
20620	Beige	Medium	8 cm	33-41 cm
20620	Beige	Large	8 cm	41-48 cm
20621	Beige	Small	11 cm	25-33 cm
20621	Beige	Medium	11 cm	33-41 cm
20621	Beige	Large	11 cm	41-48 cm
20622	Beige	Small	13 cm	25-33 cm
20622	Beige	Medium	13 cm	33-41 cm
20622	Beige	Large	13 cm	41-48 cm



Eclipse® Halskrage

Eclipse halskrage har moderne design og en god passform og funksjon. Eclipse er enkel å justere og har en semirigid rammestruktur med "quick-fit" funksjoner for enkel utprøving og tilpassing av størrelsen. Eclipse har som formål å begrense fleksjon, ekstensjon og rotasjon for å fremme pasientens bedring. Den åpne rammekonstruksjonen gjør den luftig og behagelig samt at den får en stor trachea-åpning. Kun én størrelse som dekker det meste i omfang og høyde. Polstringen kan byttes ut og kan kjøpes separat. Høyden kan stilles inn mellom 7,5 cm opp til 18,75 cm.

Bruksområder: Stabilisering av ryggraden for å begrense bøyning, strekking og rotasjon etter en nakkeskade eller -lidelse.

Art. nr.	Modell	Farge	Størrelse
20628	Eclipse Halskrage	Lysegrå	En størrelse
20629	Ekstra polstring	Grå	En størrelse



Halskrage formet modell

Myk halskrage i anatomisk formet modell. Den gir avlastning og støtte for nakkens strukturer. Følger hakens og kroppens konturer for en bekvem passform. Stoffet er i hovedsak bomull. Materialet er uten Latex.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av nakke ved f.eks. nakkesperre, stivhet, overbelastet muskulatur eller revmatisk smerte.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Høyde	Omkrets
47012	Grå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47012	Grå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47012	Grå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47012	Grå	Large	12 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	Large	12 cm	32 – 48 cm





Halskrage rett modell

Myk halskrage i rett modell. Den gir avlastning og støtte for nakkens strukturer. Kan lukkes foran eller bak. Stoffet er i hovedsak av bomull. Materialet er uten Latex.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av nakke ved f.eks. nakkesperre, stivhet, overbelastet muskulatur eller revmatisk smerte.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Høyde	Omkrets
47010	Grå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47010	Grå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47010	Grå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47010	Grå	Large	12 cm	32 – 48 cm
47011	Blå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47011	Blå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47011	Blå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47011	Blå	Large	12 cm	32 – 48 cm



Vission halskrage

Myk halskrage i anatomisk formet modell som gir avlastning og støtte for nakkens strukturer. Følger haken og brystets konturer for en behagelig passform. Trekket av Lycra gir et moderne utseende samt en sval og god følelse mot huden. Materialet er helt uten Latex.

Bruksområder: Midlertidig avlastning av nakke ved f.eks. overbelastet muskulatur eller revmatisk smerte.

Art. nr.	Farge	Størrelse	Høyde	Omkrets
47014	Svart	X-Small	6 cm	32-48 cm
47014	Svart	Small	8 cm	32-48 cm
47014	Svart	Medium	10 cm	32-48 cm
47014	Svart	Large	12 cm	32-48 cm

RYGGORTOSER



Hyperekstensjonsstøtte C35+

Justerbart trepunkttskorsett av aluminium og kunstlær for postoperativ behandling. Det begrenser fleksjon og bevegelighet sideveis i ryggen. Korsettet er justerbart i høyde og brystvidde og har en brystplate som kan vris med gradering som gjør det enkelt å stille inn vinkelen. Den nedre bøylen kan stilles i bevegelig eller fast posisjon. Justerbar ryggplate.

Bruksområder: Immobiliseringsbehandling av lumbale og thoracolumbale stabilefrakturer forårsaket av traume, stabile kompresjonsfrakturer pga. Osteoporose, Luksasjoner eller Osteoartritt.

Annet: For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube –kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Høyde	Hoftemål
20355	C35+	Small	39-48 cm	74-86 cm
20355	C35+	Medium	42-51 cm	84-98 cm
20355	C35+	Large	44-52 cm	96-110 cm
20355	C35+	X-Large	48-57 cm	106-120 cm
20351	Ekstra brystplate	En størrelse		
20352	Ekstra ryggplate	Small/Medium		
20352	Ekstra ryggplate	Large/X-Large		
20354	Ekstra bånd med spenne	Small/Medium		
20354	Ekstra bånd med spenne	Large/X-Large		
20356	Polstring til øvre bøyle foran			



Hyperekstensjonsstøtte C37

Justerbart trepunkttskorsett av aluminium og kunstlær. Det begrenser fleksjon og bevegelighet sideveis i ryggen. Korsettet er justerbart i høyde og vidde, har en hofteplate som kan vris og justerbar ryggplate. Den nedre bøylen er justerbar i vinkelen.

Bruksområder: Immobiliseringsbehandling av lumbale og thoracolumbale; stabile frakturer forårsaket av traume, stabile kompresjonsfrakturer pga. Osteoporose, luksasjoner; osteoartritt.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Høyde	Hoftemål
20370	C37	Small	43-50 cm	76-94 cm
20370	C37	Large	48-59 cm	94-114 cm
20351	Ekstra brystplate	En størrelse		
20352	Ekstra ryggplate	Small/Medium		
20352	Ekstra ryggplate	Large/X-Large		
20354	Ekstra bånd med spenne	Small/Medium		
20354	Ekstra bånd med spenne	Large/X-Large		
20356	Polstring til øvre bøyle foran			

POST-OP



Postoperativ sko

Behandlende sko med en vattert, slitesterk nylonoverdel og borrelås med d-ring. Overdelen tilpasser seg etter hevelser og bandasjer. Vattert innersåle med en stiv, lett og slitesterk ytre såle. Sålen er utformet for forbedret stabilitet. Dette forenkler rehabilitering etter fotkirurgi, traume eller andre tilstander som krever immobilisering for å fremme helingen. Skoen kan også brukes i kombinasjon med en gips.

Indikasjoner: Tilpasser seg til bandasje eller hevelser, fotkirurgi, håndtering av brukket tå, metatarsalskader, mykdelsprosedyrer, håndtering av diabetesføtter og postoperativt.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Lengde såle	Bredde såle
432090011	Herre	Small	Bilat.	26 cm	10 cm
432090012	Herre	Medium	Bilat.	27,5	10 cm
432090013	Herre	Large	Bilat.	30 cm	10 cm
432090014	Herre	X-Large	Bilat.	31 cm	11 cm
432080011	Dame	Small	Bilat.	23,5 cm	8 cm
432080012	Dame	Medium	Bilat.	24,5 cm	9 cm
432080013	Dame	Large	Bilat.	26 cm	9 cm
432070000	Pediatrisk	One size	Bilat.	20 cm	8 cm

Support for Better Life!



Tel
E-post
Web

SVERIGE
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no