

VACO®ped Diabetic

OPED VACO®cast Diabetes etterligner den gylne standarden for avlastning med TCC (Total Contact Cast) for diabetiske fotsår. Det er en ortopedisk fraktursko med fast bøyning, designet og konstruert for å støtte en rask tilheling samtidig som den gir optimal komfort. I motsetning til VACOcast Diabetic-støvel Art nr. 47664 kan denne modellen justeres til 10° dorsalfleksjon, som flytter vekten fremover og bort fra hælen for enda bedre avlastning – ideelt ved vanskelige hælssår.

Innersålen er utstyrt med OPEDs patenterte vakuumteknologi, som er det moderne alternativet til gips og en integrert del av VACO®-produkter. En pute fylt med tusenvis av isoporkuler omgir den skadede kroppsdelen. Når luften suges ut av puten ved hjelp av en pumpe, blir den hard (som en gips) på bare noen sekunder. Ved å åpne ventilen og la luft strømme inn i puten, blir den myk igjen, noe som gjør justering til kroppsdelen mulig. VACO®cast Diabetes er utstyrt med ekstra VACO®cushions for økt støtte og holdbarhet ved vekt bærende aktiviteter. Den har en friksjonsfri velourliner som reduserer friksjon og som er skånsomt mot sensitiv hud, i en svart farge som skjuler sekreter og fukt flekker. Produktet er klinisk bevist å fremme vellykket sårheling takket være utmerket trykkavlastning. Det muliggjør enkel inspeksjon av såret og forenkler behandlingen.

En låsbar spenne muliggjør bedre etterlevelseskontroll, og den integrerte rullerålen sikrer god trykkfordeling samt et bedre gangmønster. VACO®cast Diabetes leveres med tåbeskyttelse for både hygiene og ekstra beskyttelse, samt en formbar skumminnersåle for ytterligere avlastning. Finnes kun i tre størrelser (sparer lagringsplass).

Bruksområde

Sår på foten, diabetiske fotsår, postoperativ behandling etter amputasjon av tå eller forfot, diabetisk nevro-osteoartropati (DNOAP) eller Charcot-fot. Kan brukes på pasienter med arteriesykdom, nevropati, infiserte eller sterkt væskende sår.



Art.nr.	Modell	Størrelse	Omkrets legg	Omkrets ankel	Framfotens bredde
476680011	VACO®ped Diabetic	Small	29-39 cm	14-29 cm	10,5 cm
476680012	VACO®ped Diabetic	Medium	35-51 cm	35-51 cm	12 cm
476680013	VACO®ped Diabetic	Large	40-58 cm	30-45 cm	13,5 cm
476640011	VACOPed Diabetes-sett - slitedeler	Small	29-39 cm	14-29 cm	10,5 cm
476640012	VACOPed Diabetes-sett - slitedeler	Medium	35-51 cm	22-40 cm	12 cm
476640013	VACOPed Diabetes-sett - slitedeler	Large	40-58 cm	30-45 cm	12 cm
476510000	Forforlengelse - legg	-	-	-	-
476520000	Forforlengelse - ankel	-	-	-	-
476530011	Ekstra polstring, tåhette	Small	29-39 cm	14-29 cm	10,5 cm
476530012	Ekstra polstring, tåhette	Medium	35-51 cm	22-40 cm	12 cm
476530013	Ekstra polstring, tåhette	Large	40-58 cm	30-45 cm	13,5 cm
476570011	Ekstra polstring	Small	29-39 cm	14-29 cm	10,5 cm
476570012	Ekstra polstring	Medium	35-51 cm	22-40 cm	12 cm
476570013	Ekstra polstring	Large	40-58 cm	30-45 cm	13,5 cm