

VACO[®]cast Diabetic

OPED VACO[®]cast Diabetes etterligner den gylne standarden for avlastning med TCC (Total Contact Cast) for diabetiske fotsår. Det er en ortopedisk fraktursko med fast bøyning, designet og konstruert for å støtte en rask tilheling samtidig som den gir optimal komfort.

Innersålen er utstyrt med OPEDs patenterte vakuumteknologi, som er det moderne alternativet til gips og en integrert del av VACO[®]-produkter. En pute fylt med tusenvis av isoporkuler omgir den skadede kroppsdelen. Når luften suges ut av puten ved hjelp av en pumpe, blir den hard (som en gips) på bare noen sekunder. Ved å åpne ventilen og la luft strømme inn i puten, blir den myk igjen, noe som gjør justering til kroppsdelen mulig. VACO[®]cast Diabetes er utstyrt med ekstra VACO[®]cushions for økt støtte og holdbarhet ved vekt bærende aktiviteter. Den har en friksjonsfri velourliner som reduserer friksjon og som er skånsomt mot sensitiv hud, i en svart farge som skjuler sekreter og fukt flekker. Produktet er klinisk bevist å fremme vellykket sårheling takket være utmerket trykkavlastning. Det muliggjør enkel inspeksjon av såret og forenkler behandlingen.

En låsbar spenne muliggjør bedre etterlevelsesk kontroll, og den integrerte rullerålen sikrer god trykkfordeling samt et bedre gangmønster. VACO[®]cast Diabetes leveres med tåbeskyttelse for både hygiene og ekstra beskyttelse, samt en formbar skuminnnersåle for ytterligere avlastning. Finnes kun i tre størrelser (sparer lagringsplass).

Bruksområde

Sår på foten, diabetiske fotsår, postoperativ pleie etter tå- og fremfotsamputasjoner, samt diabetisk nevro-osteartropati (DNOAP) eller Charcot-fot. Kan brukes på pasienter med arteriesykdom, nevropati, infiserte eller sterkt væskende sår.

Mål

Skostørrelse og/eller ankel-/leggomkrets samt forfotbredde. Ved størrelsesgrensene mellom Small/Medium og Medium/Large-versjonene bør den større størrelsen av VACO[®]cast Diabetic velges hvis mulig.



Art.nr.	Modell	Størrelse	Omkrets legg	Omkrets ankel	Framfotens bredde
476360011	VACOCast Diabetes	Small	29-39 cm	14-29 cm	10,5 cm
476360012	VACOCast Diabetes	Medium	35-51 cm	35-51 cm	12 cm
476360013	VACOCast Diabetes	Large	40-58 cm	30-45 cm	13,5 cm
476440011	VACOCast Diabetes-sett - slitedeler	Small	29-39 cm	14-29 cm	10,5 cm
476440012	VACOCast Diabetes-sett - slitedeler	Medium	35-51 cm	22-40 cm	12 cm
476440013	VACOCast Diabetes-sett - slitedeler	Large	40-58 cm	30-45 cm	13,5 cm
476530011	Ekstra polstring, tåhette	Small	-	-	-
476530012	Ekstra polstring, tåhette	Medium	-	-	-
476530013	Ekstra polstring, tåhette	Large	-	-	-
476570011	Ekstra polstring	Small	-	-	-
476570012	Ekstra polstring	Medium	-	-	-
476570013	Ekstra polstring	Large	-	-	-
476510000	Ekstra innerfôr, leggekile	-	-	-	-
476520000	Ekstra innerfôr, ankelkile	-	-	-	-